


medical line



**ORLETT**

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

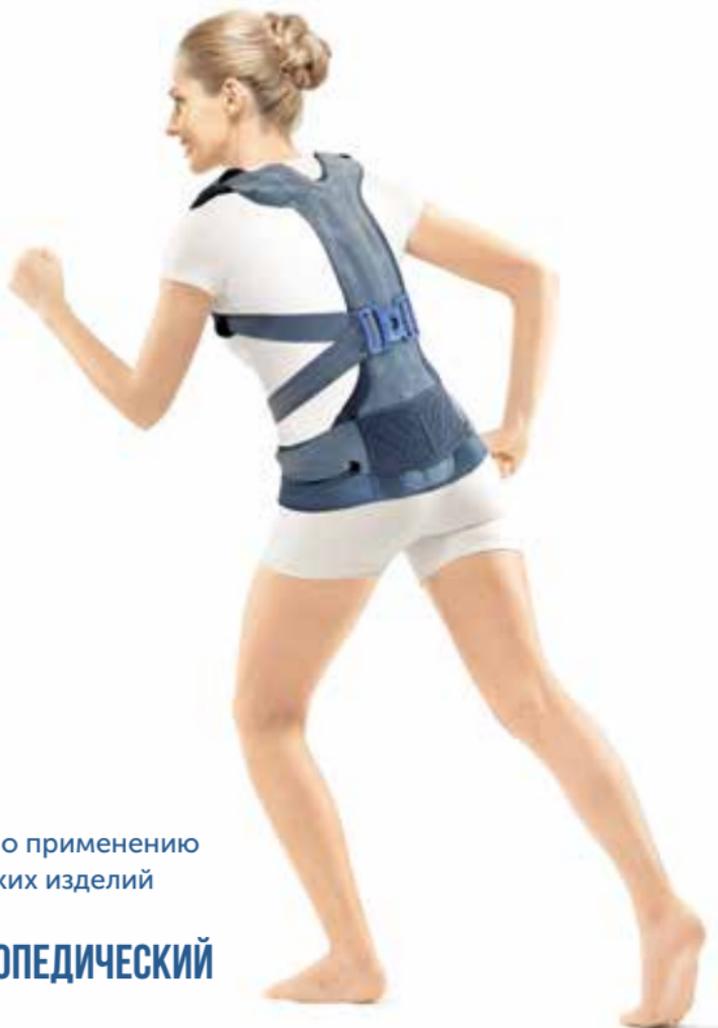

Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ**

**OBS-300**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## **СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

---

Корсет грудопоясничный ORLETT, арт. OBS-300, поэтапно корригирует гиперкифоз, способствует формированию стереотипа правильной осанки. Корсет стабилизирует и разгружает грудопоясничный отдел позвоночника и нормализует тонус мышц, участвующих в удержании положения тела. Отпускается без рецепта.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

---

- компенсирует дефицит опорности;
- нормализует тонус мышц проблемных участков спины;
- снижает нагрузки на межпозвонковые диски.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

---

- остеопороз II-IV ст.;
- функциональный гиперкифоз;
- юношеский гиперкифоз (болезнь Шейермана-Мау);
- посттравматический гиперкифоз;
- последствия воспалительных заболеваний (болезнь Бехтерева).

## **РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ**

---

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач. в зависимости от заболевания, его стадии и степени выраженности. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

---

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожи в области применения корсета.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

---

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием корсета необходимо проконсультироваться с врачом.

## ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать ремни корсета слишком сильно во избежание нарушения дыхания.

## КОНСТРУКЦИЯ

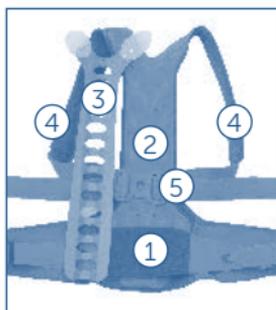


рис. 1

Корсет ортопедический Orlett, арт. OBS-300, состоит из следующих элементов (цифры на рисунке соответствуют элементам конструкции):

1. пояс корсета;
2. малоэластичная спинка;
3. металлическая рама;
4. наплечные нерастяжимые ремни;
5. запатентованный механизм «Бабочка» для легкой подгонки корсета по высоте.

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Перед использованием корсета необходимо индивидуально изогнуть металлическую раму под контролем врача или техника ортопеда.

Если первая примерка показала, что предформованная металлическая рама подходит пациенту, дополнительно формовать ее не нужно.

1. Корсет закрепить на животе поясом с застежкой велкро (рис. 2).
2. Расположить раму симметрично относительно позвоночного столба. Пропустить наплечные ремни корсета под мышками и перекрестить их на спине.
3. Отрегулировать положение ремней согласно росту пациента при помощи механизма «Бабочка» и цифр на спинке корсета (рис. 3).
4. Расправить плечи и зафиксировать положение плечевого пояса, застегнув лямки с застежками-липучками велкро на животе (рис. 4).
5. Зафиксировать корсет дополнительным эластичным поясом.



рис. 2


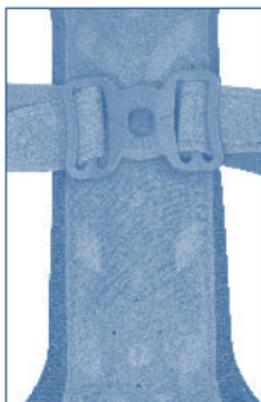


рис. 3



рис. 4

## ПРАВИЛА ПОДБОРА

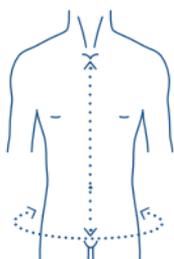

Для подбора размера корсета сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность бедер и расстояние от яремной выемки до лонного сочленения.

Согласно полученным результатам подобрать корсет по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность бедер, см	Высота от яремной выемки до лонного сочленения, см
S1	78-93	51-59
M1	90-105	51-59
M2	90-105	59-68
L2	103-120	59-68
L3	103-120	68-75

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Машинная стирка в деликатном режиме при температуре не выше 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## СОСТАВ

27% алюминий, 32% полиамид, 23% полиуретан, 8% полиэтилен, 4% полиэстер, 3% эластан, 2% полипропилен, 1% BRASS.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

## СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета.  
Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.  
По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Ортопедическое изделие арт. OBS-300, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности, корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы: корсеты ортопедические: арт. OBS-300. Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

**Производитель:** Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

**Место производства:** PRIM, S.A., C/Yolanda González 15, P.I. 1 28938 Móstoles. Madrid, Spain.

**Импортер/уполномоченный представитель в РФ:** ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

