

Протекторы с силиконовой вставкой для переднего отдела стопы СТ-39

Описание:

- занимают минимум пространства в обуви
- тканевая основа обеспечивает повышенную износостойкость
- состав — силикон, тканевое полотно

Функции:

- снижение нагрузки на передний отдел стопы
- уменьшение болевых ощущений при ходьбе

Показания к применению:

- болезненные натоптыши и мозоли в переднем отделе стопы
- поперечная распластанность стоп
- травмы и деформации в переднем отделе стопы
- остеохондропатии головок плюсневых костей
- артрозы суставов в переднем отделе стопы

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования стопы
- открытые и кровоточащие раны

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:

- надеть непосредственно на стопу, расположив силиконовую подушечку под передний отдел стопы

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- промывать в теплом мыльном растворе
- протирать мягкой тканью
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей
- хранить изделие в сухом и чистом месте
- не подвергать изделие высокой температуре, влажности и пыли, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей

Ортопедические стельки, полустельки и вкладные приспособления в обувь рекомендуется использовать в одной паре обуви. Используйте изделия в обуви, рекомендованной врачом, либо в обуви, конструктивно подходящей для определенного вида изделий. Изделия, снабженные клеевыми фиксаторами, не рекомендуется извлекать из обуви во избежание порчи изделия.